

Fuji DRI-CHEM IMMUNO AU10V

T4 und TSH Messung



Probenmaterial

- Lithium-Heparin **Plasma, Serum**

Testvorbereitung

- Blutprobe zentrifugieren
- Reagenzien aus dem Kühlschrank nehmen
- Pipettenspitze in Tip-Position stecken
- Mindestens 200 µL Serum bzw. Plasma in ein 0,5 ml Fuji Tube pipettieren

Testdurchführung



- Testkartusche einsetzen
- Probe einsetzen
- Patienten-ID eingeben

ID

-> fortlaufende Nummer mit **ENTER** bestätigen
-> Patienten ID eingeben -> **ENTER**

REF

-> Tierart auswählen

- Gerätedeckel schließen
- START drücken

Aufruf gespeicherter Ergebnisse

Mode

-> 26 -> ENTER -> Display -> mit ▲▼ Ergebnis auswählen

Ergebnis erneut senden

Mode

-> 25 -> ENTER -> Display -> mit ▲▼ Ergebnis auswählen -> ENTER



scil animal care company GmbH
Dina-Weissmann-Allee 6
68519 Viernheim
Tel.: +49 (0) 6204 78 90 0
Fax: +49 (0) 6204 78 90 200
Email: info-de@scilvet.com
www.scilvet.de

Kurzbedienungsanleitung

Fuji DRI-CHEM IMMUNO AU10V

Cortisol Messung



Probenmaterial

- Lithium-Heparin **Plasma, Serum**

Testvorbereitung

- Blutprobe zentrifugieren
- Reagenzien aus dem Kühlschrank nehmen
- Pipettenspitze in Tip-Position stecken
- Mindestens 200 µL Serum bzw. Plasma in ein 0,5 ml Fuji Tube pipettieren

Testdurchführung Cortisol Bestimmung im Verdünnungsmodus

- **Patienten-ID** eingeben und **Tierart** auswählen
- Taste ► und ▼ gleichzeitig drücken
 - Das Gerät wechselt in den Verdünnungsmodus



- Testkartusche einsetzen
- Pipettenspitze einsetzen
- 0,5ml NaCL in ein Fuji Plain Tube pipettieren und in die Probenposition einsetzen
- Gerätedeckel schließen
- **START** drücken
 - Die Testkartusche fährt in das Geräteinnere.
 - Warten, bis die Testkartusche wieder in ihrer Originalposition ist.
- Fuji Plain Tube mit NaCL entfernen
- Pipettenspitze einsetzen
- Probe einsetzen
- Gerätedeckel schließen
- **START** drücken

Aufruf gespeicherter Ergebnisse

Mode -> 26 -> ENTER -> Display -> mit ▲▼ Ergebnis auswählen

Ergebnis erneut senden

Mode -> 25 -> ENTER -> Display -> mit ▲▼ Ergebnis auswählen -> ENTER



scil animal care company GmbH
Dina-Weissmann-Allee 6
68519 Viernheim
Tel.: +49 (0) 6204 78 90 0
Fax: +49 (0) 6204 78 90 200
Email: info-de@scilvet.com
www.scilvet.de