


Anleitung zum Softwareupdate am Samsung PT10V

USB-Update

1. Öffnen Sie die URL <http://www.scilvet.de/service/downloads/> im Internetbrowser.
2. Suchen Sie in der Liste das Samsung PT10V.
3. Wählen Sie den Punkt **Software-Update-Vers-2.06.24** aus.
4. Speichern Sie den zip-Ordner auf Ihrem PC und extrahieren Sie die einzelnen Dateien.
5. Speichern Sie die Updatedateien auf einem leeren USB-Stick.

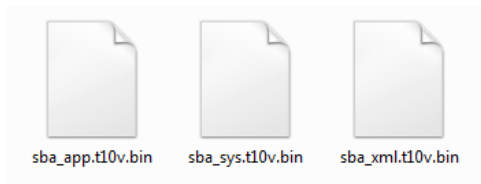

6. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port auf der Rückseite des Gerätes.
7. Schalten Sie Ihr Samsung PT10V ein.

Führen Sie das Softwareupdate durch (siehe auch Benutzerhandbuch Seite 132)

1. Wählen Sie das Menü „**Einstellungen**“ aus.
2. Wählen Sie den Menüpunkt „**System**“ aus.
3. Wählen Sie den Menüpunkt „**Update**“ aus.
4. Wählen Sie die Updatequelle „**USB-Speicher**“ aus.
5. Das Update wird automatisch installiert.
6. Entfernen Sie den USB-Stick nach Beendigung des Updates.
7. Führen Sie einen „**Neustart**“ des Gerätes durch.



Online- Update

Das Gerät muss an ein Netzkabel (LAN) angeschlossen und mit dem Netzwerk verbunden sein.

Führen Sie das Softwareupdate durch (siehe auch Benutzerhandbuch Seite 132)

1. Wählen Sie das Menü „**Einstellungen**“ aus.
2. Wählen Sie den Menüpunkt „**System**“ aus.
3. Wählen Sie den Menüpunkt „**Update**“ aus.
4. Wählen Sie die Updatequelle „**Internet**“ aus.
5. Das Update wird automatisch installiert.
6. Führen Sie einen „**Neustart**“ des Gerätes nach Beendigung des Updates durch.