


Anleitung zur Erstellung neuer Tierarten am Element DC


1. Menü „Einstellungen“ anwählen



2. Menü „Analyse“ anwählen

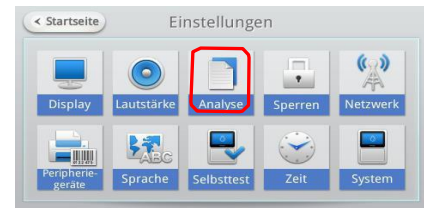

3. Menü „Referenzbereich“ anwählen

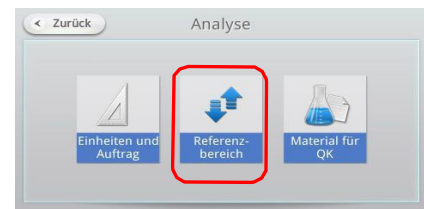

4. Register „Haupt“ zur Eingabe häufig verwendeter Tierarten auswählen.

5. „Hinzufügen“ anwählen



6. Name der Tierart eingeben (max. 20 Zeichen)

7. Referenzbereiche (siehe Referenzwerttabelle) eingeben

8. „OK“ zum Speichern drücken

