

Element DC

Monatliche Reinigung der Kartuschenöffnung

Reinigung der Kartuschenöffnung

1. Schalten Sie das Element DC aus.
2. Öffnen sie die vordere Abdeckung.
3. Positionieren Sie die Spitze des Blasebalgs an der Kartuschenöffnung.
4. Pumpen Sie drei- bis fünfmal Luft in die Kartusche (in unterschiedliche Richtungen).
5. Schließen Sie die vordere Abdeckung und schalten Sie das Gerät an.
6. Prüfen Sie, ob beim Starten des Geräts ein Fehler auftritt.
7. Wählen Sie das Menü ‚Einstellungen‘ an.
8. Drücken Sie die Taste ‚Selbsttest‘.
9. Drücken Sie die Taste ‚Diagnose‘ und wählen Sie ‚Ja‘ zur Bestätigung. Das Element DC führt einen Selbsttest durch.
10. Die Ergebnisse des Selbsttests werden im Display angezeigt. Da der Selbsttest ohne Kartusche durchgeführt wird, werden die Testergebnisse für „Kamera und BLU“ sowie „QR-Code“ mit k. A. gekennzeichnet. Die weiteren Testergebnisse müssen mit OK gekennzeichnet sein.
11. Drücken Sie die Taste ‚Zurück‘ zum Verlassen des Menüs.
12. Drücken Sie die Taste ‚Startseite‘, um in das Hauptmenü zu gelangen.

