


Anleitung zur Erstellung neuer Tierarten am Samsung PT10V


1. Menü „Einstellungen“ anwählen



2. Menü „Analyse“ anwählen

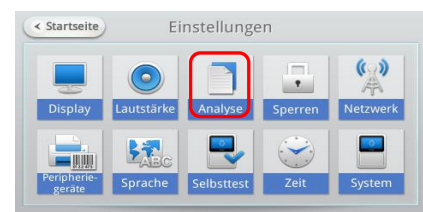

3. Menü „Referenzbereich“ anwählen

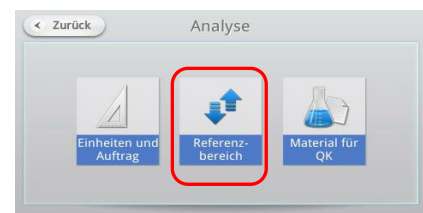

4. Register „Haupt“ zur Eingabe häufig verwendeter Tierarten auswählen.

5. „Hinzufügen“ anwählen



6. Name der Tierart eingeben (max. 20 Zeichen)

7. Referenzbereiche (siehe Referenzwerttabelle) eingeben

8. „OK“ zum Speichern drücken

