



Kurzbedienungsanleitung - Samsung PT10V



Probenmaterial

- Lithium-Heparin Plasma
- Serum

Gerät einschalten / ausschalten

- Gerät am Netzschalter auf der Rückseite auf ON stellen
- Gerät über den Ein/Aus-Schalter auf der Vorderseite des Gerätes einschalten bzw. ausschalten
- Aufwärmzeit eine Minute

Testdurchführung

- »Ausführen« drücken
- »Patienten-ID« eingeben
- »Tierart« auswählen und mit »OK« bestätigen
- 70µL Lithium-Heparin Plasma oder Serum auf das Probenauftragfenster der Kartusche pipettieren
- Frontabdeckung öffnen und Kartusche einsetzen
- Frontabdeckung schließen
- Analyse startet vollautomatisch
- Messergebnis wird nach Abschluss der Analyse im Display angezeigt, ausgedruckt und an die Labor-EDV übertragen.
- Frontabdeckung öffnen und Kartusche entfernen

Aufrufen gespeicherter Ergebnisse

- »Ergebnisse« drücken
- Register »Patient« auswählen
- »Suchen« drücken
- »Patienten-ID« eingeben und mit »OK« bestätigen
- »Details anzeigen« drücken, um die Referenzbereiche, Kartuschentyp und interne Patienten-QC (HEM, LIP, IKT) anzuzeigen.

Ergebnisinterpretation


- A** außerhalb des Referenzbereichs
- <** **>** außerhalb des Meßbereichs
- !** Qualitätskontrolle fehlgeschlagen

Ergebnisse erneut senden / drucken

- »Ergebnisse« drücken
- Register »Patient« auswählen
- »Suchen« drücken
- »Patienten-ID« eingeben und mit »OK« bestätigen
- »Drucken« zum erneuten Ausdruck des Befundes drücken
- »Senden« zur erneuten Datenübertragung drücken
- »PC« zur erneuten Datenübertragung an den PC drücken
- »EMR/LIS« zur erneuten Datenübertragung an das Samsung Tablet drücken

Tägliche Reinigung

- tägliche Reinigung
- Frontabdeckung öffnen
- Kolbenstößel entfernen
- Kolbenstößel vorsichtig mit einem Tuch mit destilliertem Wasser reinigen
- Kolbenstößel trocknen und einsetzen

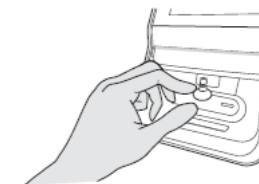

Halbjährliche Wartung

- Frontabdeckung öffnen
- Kolbenstößel entfernen
- neuen Kolbenstößel einsetzen

